

È responsabilità del chirurgo informare prima dell'intervento il paziente o i suoi rappresentanti delle possibili complicanze associate all'impianto e che, in caso di complicazioni, il dispositivo potrebbe non risultare completamente rimovibile.

Il paziente deve essere informato del fatto che il dispositivo è un impianto permanente e che qualsiasi complicanza associata all'impianto potrebbe rendere necessario un intervento aggiuntivo.

La paziente deve essere avvertita del fatto che le future gravidanze potrebbero invalidare gli effetti chirurgici dell'impianto del dispositivo in quanto si potrebbe creare una recidiva.

Il chirurgo deve attentamente monitorare lo stato del paziente prima delle dimissioni dall'ospedale e, al momento della dimissione, sarà sua cura fornire le dovute indicazioni sulle norme comportamentali da seguire durante la convalescenza.

È compito del chirurgo avvisare il paziente di contattare immediatamente il medico nel caso compaiano sintomi quali, ma non limitati ad arrossamento, gonfiore, dolore, secrezioni della zona circostante la ferita e comparsa di febbre in quanto segnale di una possibile infezione; rossore, prurito e irritazione/gonfiore della zona a contatto con il cerotto; sanguinamento della ferita, dolore addominale o dolore al testicolo anomali; dolore al polpaccio e sensazione di affanno.